



Roller slide light

送料 B/A

ローラーズライドライト

RSL 本体 (カバー付)
CRSL 本体用カバー

¥125,000
¥22,000

移乗介護がスムーズに行える超低摩擦素材を採用。

- 大柄な男性も移乗できる標準サイズ。
- たためるので収納し易く場所もとりません。

[仕様] ●寸法: 170 (L) × 50 (W) cm ●質量: 約2kg (含カバー) ●材質: ボード本体/PVC (塩化ビニル樹脂)、ポリエチレン、ナイロン (ポリウレタンコート加工)、カバー/ナイロン



Mini roller slide light

送料 B/A

ミニローラーズライドライト

MRSL 本体 (カバー付)
CMRSL 本体用カバー

¥80,000
¥14,000

移乗介護がスムーズに行える超低摩擦素材を採用。

- 持ち運びが簡単なコンパクトサイズです。

[仕様] ●寸法: 85 (L) × 50 (W) cm ●質量: 約1.1kg (含カバー) ●材質: ボード本体/PVC (塩化ビニル樹脂)、ポリエチレン、ナイロン (ポリウレタンコート加工)、カバー/ナイロン

ローラーズライドライト使用方法

使用上のご注意!

1. 安全にご使用頂くために、必ずベッド及びストレッチャーのキャスターを固定し、受ける側に少なくとも1人はお立ちください。
2. 1人で使用の場合は、移乗先のベッドやストレッチャーの転落防止の柵をご使用ください。



●ボードを広げ、受ける側からボードの約3分の1をご利用者の身体の下に挿入します。



●確実に頭部と足がボードに乗っているか、腕が移乗時に巻き込まれないかを確認します。



●ご利用者の肩部、大腿部を押し、ボードの回転を利用して横のストレッチャーに移乗させます。



●移乗が完了したら、ボードを取り除きます。



●これで完了です。



Glider

送料 A

トランスファーボード

R-1890

¥22,400

ベッドや車の座席などから車椅子への移乗がスムーズ。

- 折りたたむので持ち運びに便利。

[仕様] ●寸法: 外形 / 640 (L) × 350 (W) × 4.5 (D) mm, 折りたたみ幅 / 12cm ●質量: 780g ●材質: ポリプロピレン ●適応体重: ~120kg ●付属品: 滑り止めシート



評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

ADL・作業療法

言語療法

自立支援機器

入浴装置

仰臥位入浴

座位入浴

ADL入浴

その他の入浴装置

入浴関連商品