

Skin Clean Cotton

New!

- 繊維の毛細血管現象により尿や下痢便を素早くおむつへ透過させ、皮膚障害を防ぎます。
- 必要な量だけちぎって使えるので経済的です。
- 一般可燃物として廃棄できます。



使用手順

①袋から適量取り出します。

②必要な部位にあてがいます。

③腰とリッドまたはおむつをあてます。



スキンクリーンコットンを袋から1/2(10枚)ほど切り取り、広げてご使用ください。

尿失禁(臀部)の覆
女性の場合はスキンリークコットンを臀部に置きよりに使用します。男性の場合はスキンリークコットンで陰部を覆うように置き付けます。

尿失禁(下背)の覆
スキンクリーンコットンを腰部(臀部より奥)にあて、スリキョウのため、背骨で挟み、臀部から陰部にスキンリークコットンを広げます。

スキンクリーンコットンをあてた上から、腰とリッドまたはおむつをあててください。

ニュースキンクリーンコットン

コード	品番	容量	入数	価格(税別)
① 24-7690-00	NSCC01	20g	10枚	¥1,600

※材質:非Jエステルコットン

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸椅子 レッド 3個			
ご要望			