



ボックス&ブロックテスト

送料 D

7531

¥107,800

脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能評価が行えます。

標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。

脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法 (TMS) などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。

幅広い被験者に対応できるように、150個のブロックで評価する仕様です。

寸法 ボックス/290 (L) × 290 (W) × 170 (H) mm (取手部含まず)
ブロック/25 (L) × 25 (W) × 25 (H) mm
仕切り板/245 (L) × 5 (W) × 120 (H) (使用時100) mm

ブロック数 合計152個 (含む予備2個) ※青・赤・緑・黄4色入り

材質 木製

付属品 ストップウォッチ、ブロック収納袋

【テスト方法】

1. 健側 (利き手側) で15秒間の練習を行います。
2. 移動したブロックを元に戻します。
ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。
3. 健側 (利き手側) で60秒間のテストを行います。
4. 移動したブロックの数をカウントします。
5. すべてのブロックをボックスの患側 (非利き手側) に移動させます。
6. 1~4の手順で患側 (非利き手側) のテストを行います。

※製造工程上、色むらや木目がそろわない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

評価測定

運動療法

水治療法

物理療法

救急

ADL・
作業療法

言語療法

自立支援
機器

衛生・
防災

入浴装置

ローゼンスコア

送料 B

RSN-100

¥220,000

末梢神経修復後の手の機能評価に。

ローゼンスコアは、手関節部で正中神経あるいは尺骨神経修復術後の手の機能回復の指標を得るためにスウェーデンのRosén, Lundborgらによって開発され、欧米を中心に広く用いられている評価法です。

8つの検査を実施しスコア化。

8つの検査をスコア化し、回復予測値と比較します。

寸法 収納ケース/505(W)×325(D)×145(H)mm

【構成】スタイ検査器具、ソラマン簡易検査キット、ローゼンスコア検査マニュアル、収納ケース、評価シート



ソラマン簡易検査 (Sollerman test)

スタイ検査 (STI-test)

※全項目を測定するには、ジェイマー型握力計、セメスワインスタインモノフィラメント、ディスク・クリミネーターの3点が別途必要です。



動作解析

機能検査

体力測定

人体測定