

【クォードケイン用】



φ13

MRA09121-13
¥300

(グレー/1個)
【適応機種】クォードケイン
(MRA-01611)



φ13

MRA09121-14
¥300

(ブラック/1個)
【適応機種】クォードケイン
(MRA-01613)



φ16

MRA09121-16
¥300

(グレー/1個)
【適応機種】クォードケイン
(MRA-01623)



φ16

MRA09121-15
¥300

(ブラック/1個)
【適応機種】クォードケイン
(MRA-01621)

【杖・ウォーカー用】



φ15

MRA09121-23
¥300

(ブラウン/1個)
【適応機種】アルミ杖スリムタイプ
(MRA-03411)



φ15

MRA09121-24
¥300

(ブラック/1個)
【適応機種】アルミ杖スリムタイプ
(MRA-03412)



φ18

MRA09121-04
¥300

(ブラック/1個)
【適応機種】アルミ杖ベーシックタイプ (MRA-01112) / ウォーカーケイン (MRB-02032) / 折りたたみ杖 (MRA-01222)



φ18

MRA09121-03
¥300

(ブラウン/1個)
【適応機種】アルミ杖ベーシックタイプ (MRA-01113) / 折りたたみ杖 (MRA-01221)



φ18

MRB-02035
¥300

(グレー/1個)
【適応機種】ウォーカーケイン (MRB-02031)



φ18

TY130-1
¥400

(ブラック/1個)
【適応機種】プラットホームクラッチ (TY135D)



φ19

R-2075
¥700

(グレー/1個)
【適応機種】型式がRで始まるクラッチ



φ19

SPR-384
¥470

(ブラック/1個)
【適応機種】T型杖 (SPR-360C)



φ21

SPR-382
¥500

(ブラック/1個)
【適応機種】T型杖 (SPR-360A)



φ21

SPR-386
¥500

(ブルー/1個)
【適応機種】松葉杖ワールド (SPR-356)



φ21

SPR-386BL
¥500

(ブラック/1個)
【適応機種】松葉杖セーフティワンS (SPR-355)



φ29

SPR-383
¥500

(ブラック/1個)
【適応機種】松葉杖 (SPR-385標準)

※ゴム足は、パイプ脚部径-2mm~+1mmの範囲で選んでください。 ※内寸の単位はすべてmmです。

ロフストランドクラッチの特長




手と前腕で体重を支え、歩行が安定します。

※カフと支柱で前腕を支えるので、握力がない方、腕の力が弱い方、肘を伸ばす力が弱い方に適しています。

※松葉杖のように2本組で使用することもあります。

松葉杖の長さの決め方

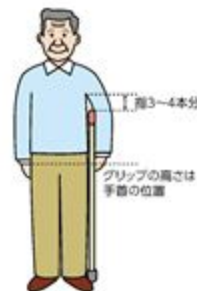

※松葉杖の長さは、まっすぐ立った姿勢で、顔の下と松葉杖のトップの間に指が3~4本入る高さにします。グリップの高さはまっすぐ立ったときの手首の位置です。この高さを目安に、ご本人の使い勝手を考慮して合わせます。

※松葉杖は、掌(グリップ)で体重を支え、腕の内側と胸の辺りの体の側面で横木を挟み込むように押さえて使います。横木を腋の下に当てて体重を支えると、腋の下に通っている多くの神経や血管を強く圧迫してしまうので、注意してください。

杖の長さ(グリップの位置)の決め方



(1) 普通に立ち、握りが腰骨あたりにくる長さ。
(2) 自然に腕を下ろしたときの、床から手首までの高さ。
(3) つま先から前に15cm、外側に15cmのところに杖をまっすぐに立てた時、肘の角度が約150°になる長さ。

※どの方法でも、ほぼ同じ長さになります。高齢者の場合は腰や背が少し曲がっていることがありますので、実際には上記の目安より2~3cm短めにすると良いでしょう。